

DESCOSUC CLEANER

Reiniger für Absauganlagen

- sehr reinigungsstark
- besonders schaumarm eingestellt
- zusätzlicher Intensivreiniger für *DESCOSUC*

- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei



PRÄPARATETYP

Flüssiges Konzentrat zur regelmäßigen Intensivreinigung von dentalen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider, Mundspülbecken und Leitungen. Desinfektions- und Reinigungsmittel für dentale Absauganlagen aller Art. **DESCOSUC CLEANER** gewährleistet eine optimale Reinigung und einen reibungslosen, störungsfreien Betrieb der Absauganlage.

ANWENDUNG

DESCOSUC CLEANER ein- bis zweimal wöchentlich anwenden. Je nach Verschmutzungsgrad 50 ml bis 100 ml **DESCOSUC CLEANER** mit Wasser auf 1 Liter auffüllen. Zur Reinigung 2 Liter Lösung frisch ansetzen (Reinigung z.B. in der Mittagspause durchführen). 2/3 der gebrauchsfertigen Lösung durch die Saugschläuche saugen, 1/3 der Lösung ins Mundspülbecken kippen.

Die beste Reinigungswirkung wird bei einer Einwirkzeit von ca. 1,5 bis 2 Stunden erzielt. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen, um gelöste Verschmutzungen komplett aus den Schläuchen zu entfernen.

Die Reinigungslösung nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.

DOSIERUNG / EINWIRKZEIT

Bei normaler arbeitsmäßiger Verschmutzung: 5 %
Bei übermäßig starker Verschmutzung: bis 10 %

Einwirkzeit: 1,5 bis 2 Stunden, je nach Verschmutzungsgrad

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates: klare, gelbliche Lösung
pH-Wert: ca. 1,7 +/- 0,5
Dichte (20°C): ca. 1,058 g/ml

ZUSAMMENSETZUNG

Organische Säuren, Komplexbildner, Korrosionsschutz, Lösungsvermittler.

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	REF-Nr.
1 L Flasche	10 x 1 L	-	00-818-010
5 L Kanister	3 x 5 L	-	00-818-050

DOSIERHILFEN

Dosierpumpe für Kanister, Dosierflasche, Kanisterumfüllhahn

BESONDERE HINWEISE

Verursacht schwere Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht einnehmen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen).

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

