

# DESCOFIX® PLUS

## flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- mit allen Reinigern kompatibel
- keine Klebeeffekte, da QAV-frei
- formaldehydfrei - daher kaum Geruchsbildung

- ✓ formaldehydfrei
- ✓ phenolfrei
- ✓ QAV-frei



CE 0482

### PRÄPARATETYP

Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Auf der Basis von Glutaral und Ethandial. **DESCOFIX® PLUS** ist phenol- und formaldehydfrei sowie frei von quartären Ammoniumverbindungen. Daher ist **DESCOFIX® PLUS** mit allen handelsüblichen Reinigertypen kompatibel und auch zusammen mit anionischen Reinigern anzuwenden. Klebeeffekte sind daher ausgeschlossen.

Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel gem. GISBAU: GD 60.

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten.

**Gem. Biozidrichtlinie:** Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

### ANWENDUNG

1. Scheuer-Wisch-Desinfektionen, z.B. Zwei-Eimer-Methode oder ähnliche Verfahren.
2. Aus zentralen oder dezentralen Dosieranlagen.
3. Mit Hilfe von Reinigungsmaschinen.
4. Sprühen aus stationären oder mobilen Geräten.
5. Aus Dosierflaschen.
6. Geeignet für alle nicht-thermischen Steckbeckenspülen.

### WIRKUNGSSPEKTRUM

**DESCOFIX® PLUS** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- fungizid (C. albicans) / levurozid
- virusinaktivierend (HBV/HIV)

Verhindert die Auskeimung von Sporen.

### DOSIERUNG / EINWIRKZEIT

bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans) / levurozid

gem. DGHM/VAH-Richtlinien

geprüft bei erhöhter Belastung:

1,0 %	60 Min.
0,5 %	4 Std.

### ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als wirksame Bestandteile enthalten:

4,45 g Glutaral  
5,4 g Ethandial

### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

**Aussehen des Konzentrates:** klare, farblose Lösung

**pH-Wert:** ca. 3,5

**Dichte (20°C):** ca. 1,06 g/ml

### LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 L Flasche	10 x 1 L	-	00-211-010
5 L Kanister	3 x 5 L	-	00-211-050
10 L Kanister	1 x 10 L	-	00-211-100

### DOSIERHILFEN

Dosierflasche, Dosierpumpe für 5- und 10-Liter-Kanister, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel, Dosierautomaten.



**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen  
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM

# **DESCOFIX® PLUS**

*flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung*

## **BESONDERE HINWEISE**

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.  
Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Irreversibler Schaden möglich.  
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen). Dampf/ Aerosol nicht einatmen.  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Bei nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln ist das Tragen von Schutzhandschuhen von den Berufsgenossenschaften vorgeschrieben.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## **GUTACHTEN**

**Prof. Dr. Schubert**, Hygieniker, Frankfurt/M.:  
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtl., 15.02.2001.

**Dr. P. Weidner**, Hygieniker, Weiterstadt:  
Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtl., 22.02.2001.

**Dr. Färber**, Hygieniker, Gießen:  
Ergänzungsgutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 27.11.2003.

## **REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG**

Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz:  
baua Reg.-Nr.: N - 20350.  
Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

