

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Datum: 20.05.2008

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

INSTRU PLUS

FLÜSSIGER REINIGER FÜR MEDIZINISCHE INSTRUMENTE UND ENDOSKOPE

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Reizt die Haut.
Gefahr ernster Augenschäden.
Gefahr der Schaumaspiration.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Behälter fest verschlossen halten.

Empfohlene Schutzausrüstung:


Körperschutz: Langärmelige Arbeitskleidung
Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz
Handschutz: Schutzhandschuhe (Nitril-, Butyl-Kautschuk)

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Brandbekämpfung: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeignetem Behälter entsorgen.

ERSTE HILFE

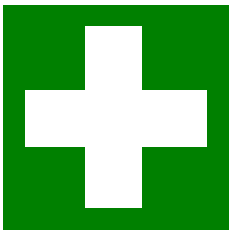

Unfalltelefon:

Ersthelfer:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Nach Verschlucken: Keinen Brechreiz auslösen. Erstickungsgefahr durch schäumende Bestandteile. Viel Wasser zu trinken geben und Arzt verständigen.

Nach Augenkontakt: Augen mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltendem Augenreiz Augenarzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise: Konzentrat nicht in Gewässer gelangen lassen. Restentleerte Verpackungen können über die örtliche Wiederverwertung entsorgt werden.