



# SILIKONSPRAY

## Pflegespray für Instrumente

- auf der Basis von Silikonölen
- zur Instrumentenpflege vor der Hitzeesterilisation
- optimale Schmierung beweglicher Teile

✓ FCKW-frei



CE

### PRÄPARATETYP

**SILIKONSPRAY** ist ein Pflegespray für medizinische Instrumente sowie Stahlwaren aller Art wie z.B. Turbinen, Scharniere und Hand- und Winkelstücke. Auf Grund der Hitzebeständigkeit von **SILIKONSPRAY** kann eine anschließende Sterilisation des Instrumentariums im Hitzeesterilisationsverfahren durchgeführt werden. Das spezielle Sprühventil sorgt für einen feinen, gleichmäßigen Schutzfilm. **SILIKONSPRAY** erhöht die Werterhaltung der Materialien durch eine optimale Schmierung beweglicher Teile und einen wirksamen Korrosionsschutz. Aufgrund der Verwendung reiner, nicht harzender Silikonöle ist **SILIKONSPRAY** äußerst materialverträglich und toxikologisch unbedenklich. Bei thermolabilen Materialien wie z.B. Gummi oder Latexteilen wird eine Quellung verhindert. **SILIKONSPRAY** kann daher auch zur Pflege der Ventile flexibler Endoskope verwendet werden. Hierbei ist das direkte Aufsprühen zu vermeiden, da unter Umständen die Treibgase die Endoskope beschädigen können.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Pflege von Stahlwaren aller Art:
- medizinische Instrumente (z.B. vor der Sterilisation)
  - Luft- oder kugelgelagerte Turbinen
  - Scharniere, Hand- und Winkelstücke

**SILIKONSPRAY** kann auch zur Pflege der Ventile flexibler Endoskope verwendet werden.

Optimale Schmierung beweglicher Teile. Durch gleichmäßige Filmbildung auf den Stahloberflächen wird ein wirksamer Korrosionsschutz gewährleistet.

Bei thermolabilen Materialien wie z.B. Gummi oder Latexteilen wird eine Quellung verhindert.

### ANWENDUNG

#### Instrumente:

Gelenke/Scharniere im halb geöffneten Zustand aus ca. 25 cm Entfernung einsprühen. Anschließend ggf. sterilisieren. Achtung: Nicht zuviel Öl aufsprühen, um die Sterilisation nicht zu behindern. Es darf nur ein dünner Ölfilm verbleiben.

#### Turbinen, Scharniere oder Hand- und Winkelstücke:

Zweimal täglich, bzw. vor jedem Autoklavieren/ Sterilisieren ca. 1 Sek. durchsprühen. Beim Sprühen Dose senkrecht halten. Vor Gebrauch schütteln.

### ZUSAMMENSETZUNG

Dimethylpolysiloxan  
Treibgas Propan/ Butan (FCKW-frei)

### LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
500 ml Spraydose	12 x 500 ml	-	00-107-005

### BESONDERE HINWEISE

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Hochentzündlich. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. **SILIKONSPRAY** ist nicht geeignet für Silikonkautschuk; in solchen Fällen **SPEZIAL ÖLSPRAY** verwenden.

### REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

