

DESCO WIPES DT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

- zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche

Die hygienisch
einwandfreie Lösung!



CE

PRÄPARATETYP

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten.

Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff. Auf Grund der quervernetzten Vliesstruktur sind **DESCO WIPES DT** sehr strapazierfähig und besonders reißfest. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.

DESCO WIPES DT wurden **speziell für die Flächendesinfektion entwickelt**. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.

DESCO WIPES DT können aus einem eigens dafür konzipierten **DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDER** entnommen werden.

Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem.

Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

DESCO WIPES FEUCHTTUCHSPENDER

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem.

Spülmaschinenfest bis 60° C.

Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist beigegefügt.

ANWENDUNG

1,5 – 2,5 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen).

Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spender-eimer mit 1,5 – 2,5 Litern der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen.

Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!

Die **Standzeit** wurde für unsere Flächendesinfektionsmittelkonzentrate in den von der DGHM/ÖGHMP empfohlenen Konzentrationen untersucht.

Zu dem wurde die Standzeit unserer gebrauchsfertigen alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel untersucht. Die Standzeiten betragen jeweils mindestens 28 Tage.


Neben den Flächendesinfektionsmitteln von Dr. Schumacher können **DESCO WIPES DT** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden.

DESCO WIPES DT sind einzeln abreißbar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt. Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum des entsprechenden Desinfektionsmittels erleichtern, sind als zusätzliche Hilfsmittel erhältlich.

Weitere ausführliche Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte unserem separat erhältlichen **DESCO WIPES** Flyer.

ANWENDUNG:

BEFÜLLEN DES
DESCO WIPES
FEUCHTTUCHSPENDERS

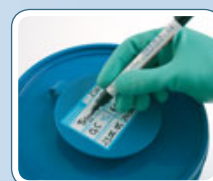

DR. SCHUMACHER GMBH
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM

DESCO WIPES DT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

ANWENDUNGSBEREICHE

DESCO WIPES DT können zur Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen, der pharmazeutischen Industrie, in Labors sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen angewendet werden.

Sie sind besonders geeignet für:

- patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen
- alle Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluß zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
- schwer zugängliche Flächen

ZUSAMMENSETZUNG


1 Rolle besteht aus 90 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochwertigem, fusselfreiem Spunlace-Lochvlies. 100% Kunstfaser-Mischung.

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 Packung Desco Wipes DT Rolle à 90 Blatt	6 x 1 Rolle	-	00-915-RD9006
1 Packung Desco Wipes DT Rolle à 90 Blatt	3 x 1 Rolle	-	00-915-RD9003
Desco Wipes Vliestuchspender 1 Spendereimer	1 x 1 Eimer	-	00-915-E001
Desco Wipes Vliestuchspender Vorratspackung 6 Spendereimer	6 x 1 Eimer	-	00-915-E002

APPLIKATIONSHILFEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Wandhalter	1 x 1 Halter	-	00-902-EIM

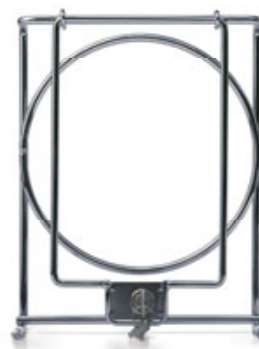

GUTACHTEN

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von *CLEANISEPT*, *BIGUANID FLÄCHE N*, *DESCOSEPT AF*, *DESCOSEPT PUR* im *DESCO WIPES SYSTEM* vom 08.11.2006.

Wirksamkeit des *DESCO WIPES TÜCHERSYSTEMS* im quantitativen Flächenversuch mit OP-Fliesen bei Einsatz von *CLEANISEPT*, *BIGUANID FLÄCHE N* vom 08.11.2006.
Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes *DESCO WIPES DT* in Kombination mit *DESCOSEPT PUR*, *DESCOSEPT AF*, 21.03.2007.
Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes *DESCO WIPES DT* in Kombination mit Produkten Desomed Rapid AF, 21.03.2007 und 12.06.2007. Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von Desomed Rapid AF, Biguamed Perfekt N im *DESCO WIPES SYSTEM*, 12.06.2007.

B.Braun Melsungen AG:

Stellungnahme zur Kompatibilität von B.Braun-Flächendesinfektionsmitteln in Verbindung mit *DESCO WIPES*, 23.04.2007.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

