

DESCO WIPES RT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächen- und Reinigungsdesinfektionsmitteln

- zur Tränkung mit allen Flächen- und Reinigungsdesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- besonders hohe Reinigungskraft



CE

PRÄPARATETYP

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Reinigungs- oder Flächendesinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem, saugstarkem Vliesstoff. Auf Grund der quervernetzten Vliesstruktur sind **DESCO WIPES RT** sehr strapazierfähig und besonders reißfest.

Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.

DESCO WIPES RT wurden speziell für die Reinigung und Flächendesinfektion entwickelt. Sie gewährleisten eine hervorragende Benetzung der Flächen und besitzen ein ausgezeichnetes Schmutztragevermögen.

DESCO WIPES RT können aus einem eigens dafür konzipierten **DESCO WIPES FEUCHTTUCHSPENDER** entnommen werden. Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem. Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

DESCO WIPES FEUCHTTUCHSPENDER

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem. Spülmaschinenfest bis 60° C.

ANWENDUNG:

**BEFÜLLEN DES
DESCO WIPES
FEUCHTTUCHSPENDERS**



Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist beigegefügt.

ANWENDUNG

1,5 – 2,5 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen).

Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spender-eimer mit 1,5 – 2,5 Litern der Gebrauchslösung des Reinigungsmittel- bzw. Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen. Einwirkzeit des Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittels beachten!

Neben den Flächendesinfektionsmitteln von Dr. Schumacher können **DESCO WIPES RT** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden.

DESCO WIPES RT sind einzeln abreißbar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt. Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum des entsprechenden Desinfektions- bzw. Reinigungsmittels erleichtern, sind als zusätzliche Hilfsmittel erhältlich.

Weitere ausführliche Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte unserem separat erhältlichen **DESCO WIPES** Flyer.



DR. SCHUMACHER GMBH
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM

DESCO WIPES RT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächen-/Reinigungsdesinfektionsmitteln

ANWENDUNGSBEREICHE

DESCO WIPES RT können zur Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen; der pharmazeutischen Industrie; in Labors sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen angewendet werden.

Sie sind besonders geeignet für:

- patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen
- alle Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluß zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
- schwer zugängliche Flächen

ZUSAMMENSETZUNG


1 Rolle besteht aus 60 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochwertigem, saugstarkem Spunlace-Lochvlies. 70% Viskose, 30% Kunstfaser-Mischung.

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	VK-Einheit	PZN	Art.-Nr.
Rolle á 60 Blatt 1 Pckg. Desco Wipes RT	6 x 1 Rolle	-	00-915-RR6006
1 Spendereimer Desco Wipes Feuchttuchspender	1 x 1 Eimer	-	00-915-E001
Vorratspackung 6 Spendereimer Desco Wipes Feuchttuchspender	6 x 1 Eimer	-	00-915-E002

APPLIKATIONSHILFEN

Einzelpackung	Verkaufeinheit	PZN	Art.-Nr.
Wandhalter	1 x 1 Halter	-	00-902-EIM

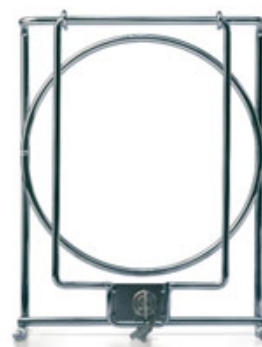

GUTACHTEN

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **CLEANISEPT**, **BIGUANID FLÄCHE N**, **DESCOCEPT AF**, **DESCOCEPT PUR** im **DESCO WIPES SYSTEM** vom 08.11.2006.

Wirksamkeit des **DESCO WIPES TÜCHERSYSTEMS** im quantitativen Flächenversuch mit OP-Fliesen bei Einsatz von **CLEANISEPT**, **BIGUANID FLÄCHE N** vom 08.11.2006.

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von Desomed Rapid AF, Biguamed Perfekt N im **DESCO WIPES SYSTEM**, 12.06.2007.

B.Braun Melsungen AG:

Stellungnahme zur Kompatibilität von B.Braun-Flächendesinfektionsmitteln in Verbindung mit **DESCO WIPES**, 23.04.2007.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

