

DESCOSEPT® WIPES

alkoholische Tücher
zur Schnelldesinfektion

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ formaldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- formaldehydfreie Schnelldesinfektionstücher mit angenehmem Duft
- schnell wirksam
- gute Hautverträglichkeit



CE 0482



PRÄPARATETYP

Gebrauchsfertige Tücher zur Wischdesinfektion auf der Basis von Ethanol, Ethandial und QAV zur wirksamen und schnellen Desinfektion und Reinigung. **DESCOSEPT® WIPES** haben einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit.

Als Wischdesinfektion in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion benötigt wird geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle, Hand- und Winkelstücke)
 - Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstisch zwischen den Operationen
 - Bettgestelle, Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
 - allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
 - Bekleidung wie OP-Schuhe, Gummischürzen
- DESCOSEPT® WIPES** entsprechen den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen im humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/540).

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und -Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art

ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOSEPT® WIPES** vollständig abwischen, bzw. ausreichend benetzen.

WIRKUNGSSPEKTRUM

Die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT®** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid (C.albicans) / levurozid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccinia) (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)

EINWIRKZEITEN

Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT®**:

bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C.albicans) / levurozid
gem. DGHM/VAH konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH/DGHM)
Tuberkulose-Bakterien (M.terrae) konz. 1 Min.

Inaktivierung von allen behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV:
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) konz. 30 Sek.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT®** sind enthalten:

- 38,9 g Ethanol
- 0,1 g Ethandial
- 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Inhalt: 1 Tücherdose/Refill enthält 120 Tücher à 14 x 20 cm, getränkt mit 210 g Desinfektionslösung **DESCOSEPT®**.





DESCOSEPT® WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT®**:

Form / Farbe: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 5,75 + / - 0,75
Dichte (20,0 °C): 0,938 +/- 0,002
Flammpunkt nach DIN 51 755: 27,0 °C

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
PE-Spenderdose mit 120 Tüchern	12 x 1 Dose	1898629	00-303-D120
Nachfüllbeutel mit 120 Tüchern	12 x 1 Beutel	1898670	00-304-R120

BESONDERE HINWEISE

Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Alkoholempfindliche Oberflächen und Acrylglas-Kunststoffe nicht benetzen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

GUTACHTEN

Gutachten für die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT®**:

Dr. Pitten, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien, 26.05.2008.

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt :

Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien, 01.08.2008.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Vaccinia-Wirksamkeit vom 12.12.2005.

Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit (HCV) vom 24.02.2006.

Dr. Färber, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit vom 11.02.03.

Prof. Dr. Tronnier, Dermatologe, Witten:

Dermatologisches Gutachten zur Hautverträglichkeit vom 16.01.96.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT®** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.

Die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT®** ist registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 20343

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

