

# DESCOCEPT® AF

alkoholisches  
Schnelldesinfektionsmittel

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel mit frischem Duft
- umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren
- gute Hautverträglichkeit

als Schaum  
applizierbar



CE 0482



## PRÄPARATETYP

**DESCOCEPT® AF** ist eine gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol und quartären Ammoniumverbindungen.

**DESCOCEPT® AF** hat einen angenehmen, **frischen Duft** und eine **gute Hautverträglichkeit**. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT® AF** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren- auch wirksam gegen Noro-Viren.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

**DESCOCEPT® AF** erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit bezüglich der Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen gem. TRGS 525/540.

## ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

**Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

## ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT® AF** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen.

Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol **DESCOCEPT® AF** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen.

**DESCOCEPT® AF** hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge.

## WIRKUNGSSPEKTRUM

**DESCOCEPT® AF** wirkt:

- bakterizid inkl. MRSA
- tuberkulozid
- fungizid, levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-Viren, Noro-Viren

## EINWIRKZEIT

**bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans)/ levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH** konz. 1 Min.\*  
 (\*gelistet in der 5-Min.-Spalte der DGHM/VAH)  
**Tuberkulose-Bakterien (M. terrae)** konz. 1 Min.  
**Aspergillus niger** konz. 30 Min.

**wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV**  
 (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) konz. 30 Sek.  
**Rota-/Adeno-Viren** konz. 1 Min.  
**Noro-Viren (FCV)** konz. 15 Min.



# **DESCOSEPT® AF**

## alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

### ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Lösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

42,0 g Ethanol  
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

**Aussehen:** klare, farblose Lösung  
**pH-Wert:** 7,0 +/- 1,0  
**Flammpunkt:** 25 °C

### LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
500 ml Flasche	20 x 500 ml	0792277	00-311-005
1 L Flasche	10 x 1 L	0792283	00-311-010
2 L Beutel	6 x 2 L	1834397	00-311-020
5 L Kanister	3 x 5 L	0792308	00-311-050
10 L Kanister	1 x 10 L	0792314	00-311-100

### DOSIERHILFEN

Sprühkopf für 500-ml und 1-Liter-Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

### BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten! Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten! Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Ausbringung max. 50 ml pro m<sup>2</sup>. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml pro m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### GUTACHTEN

**Dr. Pitten**, Hygieniker, Gießen:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien, 11.04.2008.

**Prof.Dr. Rotter**, Dip.Bact.(London), Wien:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien, 28.02.2006.

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen:  
Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-Viren, 03.05.2001; FCV (Noro Viren), 04.04.05; Vakzinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.

**Prof. Dr. Werner**, Hygieniker, Schwerin:  
Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit, 12.04.1999.

**Dermatest**, Münster:  
Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest), 26.05.2000.

**Konrad Hornschuch AG:**  
Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESCOSEPT® AF** zur Anwendung an skai- Polstermaterialien, 09.08.2005.

**Dr. Brill**, Hygieniker, Hamburg:  
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOSEPT® AF** im **DESCO WIPES SYSTEM** vom 08.11.2006; Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOSEPT® AF** vom 21.03.2007.  
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOSEPT® AF** im **ECO WIPES SYSTEM**, 13.06.2007.

### REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.  
Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP.  
Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 20338.  
Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.